

סובלים מיובש בעיניים ? יש פתרון !

REFRESH &
REJUVENATE
DRY EYES
NATURALLY

שאל את האופטומטריסט / רופא העיניים !

ריענון
והתחדשות
לעיניים יבשות
באופן טבעי

Bruder.
EyeCompress
MOIST HEAT



A simple & natural solution

עין יבשה היא אחת הסיבות הנפוצות לביקור של מטופלים אצל רופא העיניים. עיניים מגרדות, אדומות, צורבות ודומעות הן רק חלק מהסימפטומים לעין יבשה.



שימוש יומי בקומפרסים, יחד עם מגבונים לניקוי העפעפיים, שומר על בריאות העפעפיים ומקל על הסימפטומים של עין יבשה.

מסכת BRUDER מתאימה לטיפול בעין יבשה במקרים קלים, בינוניים וחמורים.

- מקלה על הסימפטומים של עין יבשה, Meibomian glands dysfunction שעורה ובלפריטיס.
- מסייעת בהכנת משטח העין לתוצאות מיטביות לאחר ניתוח.
- מספקת דרך נוחה וחسכונית לתמיכה יומית בבריאות העין.

שימוש יומי מספק היגינת עפעפיים ונותן הקלה לסימפטומים של העין היבשה!





מסכת BRUDER היא פרוטוקול טיפולי שמוביל לתוצאות מצויינות , משפר את שביעות רצון המטופלים ומגביר היענות לטיפול קליניים לעין יבשה .

המסכה מכילה פניני כסף, הרכב המבטיח קומפרס טהור ונקי בכל שימוש, עוזר בדחיית חיידקים ושומר על העפעפיים נקיים.


לקומפרס אפקטיבי זה עמידות לשימוש יומיומי - פניני הכסף לא ישברו או יאבדו אפקטיביות כמו בקומפרסים אחרים, המכילים פניני סיליקון, ג'ל או גרגירים אחרים. בקומפרסים אחרים הלחות בחלק החיצוני של המשטח גורמת לאידוי ולהפחתת יעילות הקומפרס.

איך זה עובד ?

מסכות BRUDER משתמשות ב MEDIBEADS TECHNOLOGY . מולקולות של מים נספגות בצורה רציפה מהאוויר ישרות לתוך התאים המיוחדים במסיכה.

כשמים את המסיכה במיקרוגל , המים שנספגו , משתחררים בצורת חום באופן מיידי , ללא המתנה , ללא לכלוך וללא צורך בהוספת מים .

זה פתרון מושלם לטיפול בבלפריטיס , MGD, שעורה וחלזיון !

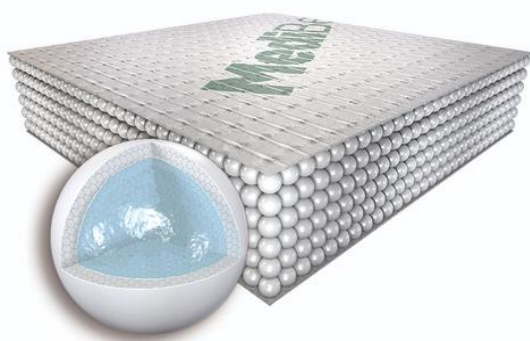

אופן השימוש פשוט וקל

- יש לשים את המסכה ל 20-30 שניות במיקרוגל .
 - לאחר מכן להניח על הפנים עם עיניים סגורות למשך 10 דקות .
 - תוך מספר דקות תורגש תחושת הקלה .
 - הקומפרס ישאר חם באופן אחיד לאורך כל הטיפול .
 - ניתן לשימוש פעם עד פעמיים ביום .
- המסכות ניתנות לשטיפה ולשימוש חוזר בין 6-9 חודשים תוך שימוש יומיומי .



Bruder
EyeCompress
MOIST HEAT

